

Beck Brain Tuner



Met functie voor Shumann Resonantie Therapie.

Inhoudsopgave

Dankwoord.....3
Wat zit erbij?.....3
Gebruik.....4
Tips.....5
Batterij vervangen.....6

Dankwoord

Hartelijk dank voor de aanschaf van de FEY Bob Beck Brain tuner. Hiermee heeft u gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig in Nederland geproduceerd product. U heeft vanaf de aanschafdatum 1 jaar garantie op fabricagefouten.

Dit apparaat is naar ontwerp van Dr. Bob Beck gemaakt. U kunt meer informatie over de werking lezen op Bobbeck.com.


Wat zit erbij?

- De Brain Tuner
- Oorclipjes die u aan de oorlellen bevestigt.
- Adapter
- Oplaadbare 9V Batterij in het batterijvak


Het apparaat werkt alleen op een 9Volt batterij. Wanneer u de oplader aansluit zal het apparaat de 9Volt Batterij opladen.



Gebruik

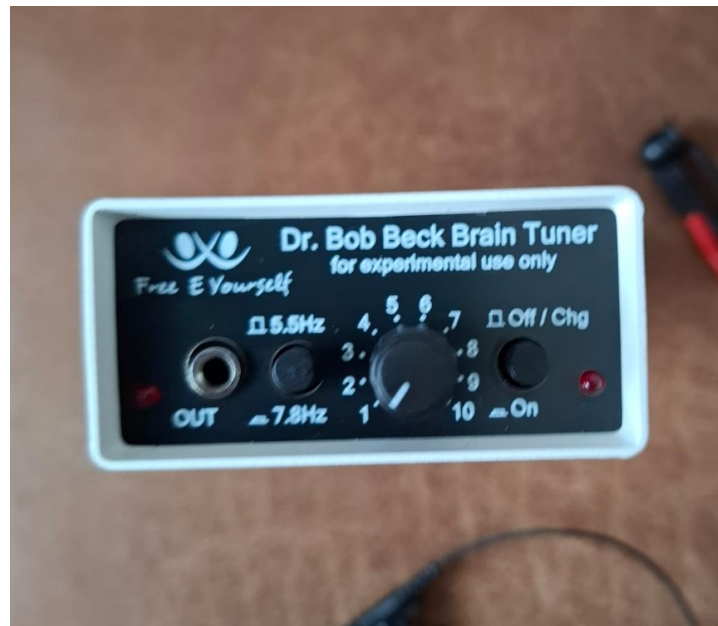

1. Kies de frequentie:
 - 5.5 Hz (knopje niet ingedrukt) - De frequentie die Dr. Bob Beck gebruikt in zijn apparaat
 - 7.8 Hz (knopje ingedrukt) – De Shumann resonantie (aardfrequentie). Met deze frequentie kunt u letterlijk “aarden”. Het is de basisfrequentie van onze planeet.
2. Bevochtig de oorlellen licht met wat water.
3. Bevestig de clipjes aan uw oorlellen
4. Draai de knop daaiknop in de laagste stand (Stand 1)
5. **Zet op uw telefoon een gewenste timer. Begin met 20 minuten en gebruik het apparaat nooit langer dan 40 minuten achter elkaar.**
6. Zet het apparaat aan (met de ON knop) en controleer of het rechter lampje aan is en het linker lampje knippert. Het linker lampje geeft de huidige frequentie aan.
7. Draai langzaam de draaiknop iets hoger totdat u een lichte tinteling in uw oorlellen voelt. Dit kan wat kietelen en wellicht moet u er even aan wennen. Het is niet de bedoeling dat het pijn doet. Wanneer dat wel zo is droog dan uw oorlellen af zodat er minder stroom doorheen loopt en probeer het opnieuw.
8. Wanneer de timer op uw telefoon afgaat zet u het apparaat uit en verwijdert u de clipjes van uw oren.

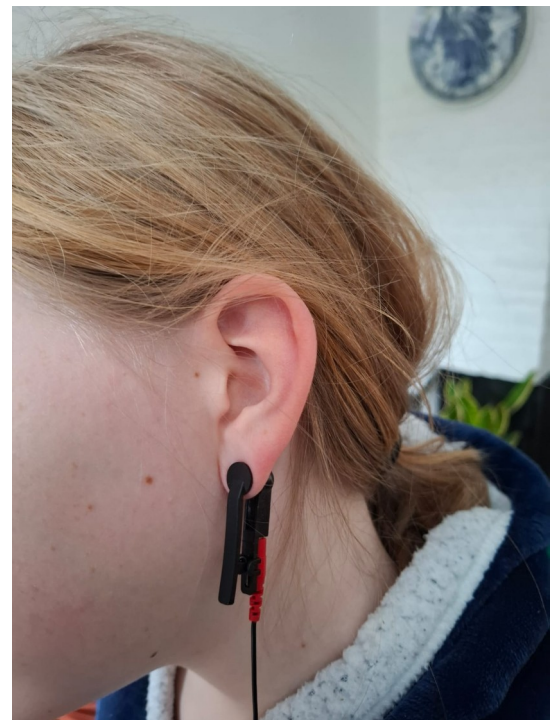

Tips

- U hoeft niet stil te zitten tijdens het gebruik van dit apparaat, maar de werking wordt versterkt wanneer u mediteert, slaapt of een rustige activiteit onderneemt.
- Het is kunt meerdere sessies per dag doen, met tussenpozen van minimaal twee uur.
- **Het is belangrijk om nooit langer dan 45 minuten achter elkaar het apparaat te gebruiken.** Dr. Beck geeft aan dat het na die tijd averechts zou kunnen werken. Zet dus altijd een timer op uw telefoon of gebruik een wekker. Vooral wanneer u in slaap valt is het belangrijk te behandeling te stoppen na maximaal 45 minuten.

Batterij vervangen

Het apparaat bevat een 9Volt oplaadbare batterij. Deze kunt u opladen met de meegeleverde adapter. U hoeft de batterij dus niet te vervangen! Wanneer deze leeg is sluit u de adapter aan en de batterij zal opladen. Wanneer u de batterij toch wilt vervangen opent u het batterijvak en schudt de batterij eruit.



Het apparaat kan werken op een 9Volt batterij die in de meeste supermarkten wordt verkocht. U kunt de 9 Volt batterij ook opladen in een daarvoor bestemde oplader.